

Краткое руководство пользователя

Обзор:



- 1 Дисплей
- 2 Кнопка назад
- 3 Кнопки со стрелками вверх и вниз
- 4 Кнопка ВКЛ / Set / OK
- 5 Гнездо для полосок с подсветкой
- 6 Батарейный отсек
- 7 Micro USB-порт
- 8 Эжектор тест-полосок

Внимание:



- Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя
- Это краткое руководство не заменяет руководство пользователя, которое содержит важные процедуры очистки и дезинфекции, а также дополнительную информацию
- Глюкометр и устройство для прокалывания предназначены для использования одним пациентом. Не делитесь ими ни с кем, в том числе с другими членами семьи! Не используйте для нескольких пациентов!
- Все части набора считаются биологически опасными и потенциально могут передавать инфекционные заболевания от патогенов, передающихся с кровью, даже после того, как вы выполнили очистку и дезинфекцию.


Заметки:

- Всегда имейте запасной комплект батарей.
- Срок службы батареи может зависеть от температуры и производителя батареи.

Выбор языка и формата времени



Кратковременно нажмите на кнопку ОК. Появится выбор языка. Стрелками вверх или вниз выберите нужный язык. Нажмите ОК

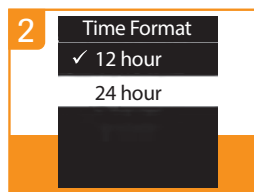

Появится формат времени. Стрелками вверх или вниз выберите формат. Подтвердите выбор кнопкой ОК и вернитесь в Главное меню.


Настройка прокалывателя




Ознакомьтесь с устройством для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс..




Достаньте ланцет из кармана чехла.

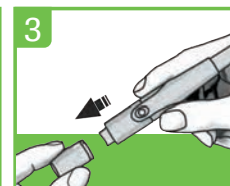

Снимите колпачок, потянув за него. Не перекручивайте колпачок.

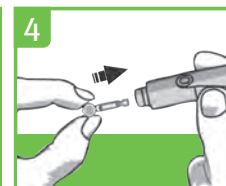

Вставьте ланцет в устройство для прокалывания до щелчка.

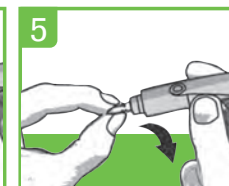

Откройте защитный колпачок ланцета.



Установите колпачок обратно на прокалыватель. Убедитесь, что выемка на колпачке совпадает с выемкой на устройстве для прокалывания.



Отрегулируйте глубину прокалывания до комфортного уровня проникновения. Начните с "2". Для более жесткой кожи наберите большее число.




Нажмите кнопку заправки до упора, как ручку. Не нажимайте кнопку Пуск, нажимая кнопку Взвод. Кнопка Пуск становится желтой, когда устройство для прокалывания готово.



Отложите устройство для прокалывания в сторону, пока не будете готовы проколоть кожу пальца.

Выполнить тест на уровень глюкозы в крови

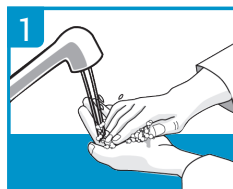


Воймите и сушите руки до и после измерения уровня глюкозы в крови.




Проверьте срок годности на контейнере с тест-полосками. Не используйте тест-полоски после истечения срока годности.



Вывньте тест-полоску из контейнера для тест-полосок. Плотно закройте крышку

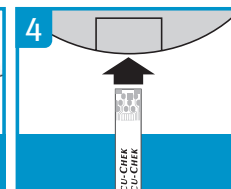

Вставьте металлический конец тест-полоски в глюкометр.

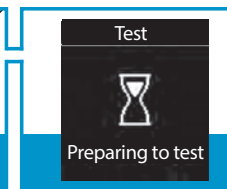

Глюкометр включится сам. Появится надпись подготовка к тесту.





Снимите колпачок устройства для прокалывания. Направьте ланцет от себя. Выдвиньте выталкиватель, чтобы извлечь ланцет.



Плотно прижмите устройство для прокалывания к кончику пальца и нажмите желтую кнопку Пуск, чтобы уколоть палец.



Прикоснитесь желтым краем тест-полоски к капле крови. Уберите палец с тест-полоски, появится сообщение «Анализ». Не наносите кровь на тест-полоску.

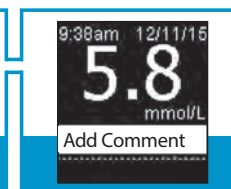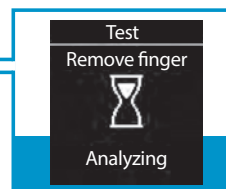

Результат теста появится на дисплее не позднее 4 сек.

Accu-Chek предлагает дополнительную информацию и видео на сайте:

accu-chek.com

